

**Fi** **Ortodonttinen vaha.** Suojaa vaurioilta ja lievittää ärsytystä. Valmiiksi leikatut palat helpottavat käyttöä ja tekevät vahan laitosta ortodontisiin kojeisiin hygieenisempää ja käteväämpää.

### Suoja oikomishoitolaiteiden käyttäjille

**Tuotteen kuvaus:** GUM ORTHO Wax on oikomisvaha (lääkinnällinen laite), joka koostuu viidestä valmiiksi leikatusta vahaliuskasta vahapaperilla muovikotelossa. Tuotetta on saatavana kahdessa eri versiossa: mauton (viite 723) ja mintun makuinen (viite 724).

**Miksi ortodontista vaha käytetään?** Oikomishoidon laitteet voivat joskus käytettäessä tuntua epämiellyttäviltä tai ne voivat ärsyttää sekä hangata suun limakalvoa. Hammaslääkärit suosittelevat suojaavan vahan käyttöä oikomishoidon aikana suojaamaan suun limakalvoja.

**Käyttöaiheet:** GUM ORTHO Wax on kehitetty erityisesti suojaamaan suun limakalvojen kudoksia vaurioilta ja lievittämään ortodontisten koeiden aiheuttamaa ärsytystä. Sitä voidaan käyttää tarpeen mukaan sekä ennaltaehkäisyyn että ärsyttävien koeiden kanssa. Tuotetta voidaan käyttää jopa 30 päivää peräkkäin. Mikäli oireet jatkuvat, ota yhteyttä hammaslääkäriisi. GUM ORTHO Wax on tarkoitettu aikuisille ja 7 vuotta täyttäneille lapsille aikuisen valvonnassa.

**Vasta-aiheet:** Älä käytä tuotetta, mikäli olet yliherkkä siinä oleville ainesosille.

**Ainesosat:** GUM ORTHO Wax: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax. GUM ORTHO Wax Mint: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax, Aroma, Carvone, D-Limonene, Eugenol, Linalool.

**Käyttöohjeet:** Pese ja kuivaa kätesi. Kuivaa levityskohta parhaan tarttuvuuden saavuttamiseksi. ① Murra palanen GUM ORTHO Waxia, lämmitä sitä sormien välissä ja muotoile vaha halutun muotoiseksi. ② Levitä vaha varovasti painamalla sitä kiinni lankoihin ja kiinnikkeisiin. Poista vaha ennen ruokailua tai hampaiden harjaamista. Aseta uusi vahapala paikoilleen tarvittaessa. Vahaa voi pitää suussa myös yöllä. Käytön jälkeen hävitä vaha talousjätteisiin.

**Varoitukset ja varotoimet:** Säilytä lasten ulottumattomissa. GUM ORTHO Wax on tarkoitettu vain suussa käytettäväksi. Älä nielaise. Säilytysolosuhteet: +5 °C - +40 °C. Älä käytä vaha viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Älä käytä, mikäli pakkaus on vaurioitunut. Jos käytön yhteydessä ilmenee odottamaton vakava reaktio, ota yhteyttä valmistajaan ja maan toimivaltaiseen viranomaiseen. GUM ORTHO Waxia ei ole testattu raskaana olevilla tai imettävillä naisilla. Mikäli käytät lääkkeitä tai olet raskaana tai imetät, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen GUM ORTHO Waxin käyttöä.

**SV/DK/NO** Skyddar mot irriteration och skador på slemhinnan. Praktiska förskurna bitar/stykker för enkel och hygienisk applicering på tandställningen/orto-bøjler. För mer information, vänligen se bipacksedeln

**Maahantuoja/importörer :** Sunstar France S.A.S., 105 rue Jules Guesde, FR-92300 Levallois-Perret  
ORTHOWAXLE723FI

Perustuen 2022-01-24 päivättyyn käyttöohjeeseen



Valmistaja:  
Sunstar Europe S.A., Route de Pallatex 11, CH-1163 Etoy

Valtuutettu edustaja EU:ssa:

Sunstar France S.A.S., 105 rue Jules Guesde, FR-92300 Levallois-Perret



Älä käytä, jos pakkaus  
on vaurioitunut



Lääkinnällinen laite



Lämpötilan  
rajotus



Luettelonumero:  
REF 723



Tutustu  
käyttöohjeisiin



Viimeinen  
käyttöpäivä



Eränumero