

Protege contra lesões e alivia a irritação. Dose unitária pré-cortada para uma aplicação mais higiénica e conveniente de cera em aparelhos ortodónticos.

Proteção para utilizadores de aparelhos de ortodontia

Descrição do produto: A cera GUM ORTHO (Ref. 723) é uma cera ortodóntica (dispositivo médico) composta por 5 tiras de cera sem sabor pré-cortadas em papel de arroz, numa caixa de plástico.

Porquê usar cera ortodóntica? Desconforto e irritações podem ocorrer ao usar aparelhos ortodónticos e que resultam da fricção repetida dos aparelhos nos tecidos da mucosa oral. Os ortodontistas recomendam o uso de cera ortodóntica para formar uma barreira protetora sobre braquetes e fios para melhorar o nível de conforto durante o tratamento ortodóntico.

Indicações: A cera GUM ORTHO foi desenvolvida especificamente para proteger os tecidos da mucosa oral de lesões e aliviar as irritações causadas por aparelhos ortodónticos. Pode ser usada quando necessário, tanto por prevenção como em aparelhos irritantes. O período de uso pode prolongar-se por 30 dias seguidos. Caso as lesões ou irritações persistam, consulte o seu ortodontista. A cera GUM ORTHO pode ser usada por adultos ou crianças de idade superior a 7 anos sob supervisão de um adulto.

Contra indicações: Não usar caso sejam conhecida hipersensibilidade a qualquer dos ingredientes.

Ingredientes: Cera microcristalina, Cera de parafina, Cera líquida de parafina.

Instruções de uso: Lave e seque bem as mãos. Seque a área de aplicação para uma boa aderência. Quebre um pedaço de cera GUM ORTHO, aqueça-o e molde-o entre os dedos. Aplique a cera para cobrir os fios e suportes que causam desconforto pressionando suavemente. Remova a cera antes de comer ou escovar os dentes. Insira um novo pedaço de cera depois. A cera pode ser mantida durante a noite. Depois de usar a cera, coloque no lixo doméstico.

Avisos e Precauções: Mantenha fora do alcance das crianças. A cera GUM ORTHO destina-se apenas a uso oral. Não engula. Condições de armazenamento: +5°C a +40°C. Não use a cera após o prazo de validade. Não use se a integridade da embalagem do dispositivo estiver danificada. Se você notar algum incidente sério relacionado com o uso do dispositivo, entre em contato com o fabricante e a autoridade competente de seu país. A cera GUM ORTHO não foi testada em mulheres grávidas ou a amamentar. Se estiver a tomar medicamentos, se estiver grávida ou a amamentar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar a cera GUM ORTHO.

Importador: Sunstar France S.A.S., 105 rue Jules Guesde, FR-92300 Levallois-Perret

Distribuído em Portugal por: Wpharma, Lda., Estr. Consiglieri Pedroso, 80 Lote 3, Queluz de Baixo, PT-2730-053 Barcarena

ORTHOWAXLE721PT

Data de revisão: 2021-03-25



Fabricante



Representante autorizado
na Comunidade Europeia



Dispositivo
médico



Número de catálogo



Limitação de
temperatura



Número de lote



Data de validade



Não utilize se a embalagem
estiver danificada



Consulte as instruções
de utilização