

PT Cera ortodôntica. Protege contra lesões e alivia a irritação. Dose unitária pré-cortada para aplicação mais higiênica e conveniente da cera em aparelhos de ortodontia.

Proteção para portadores de aparelhos de ortodontia

Descrição do produto: GUM ORTHO Wax é uma cera ortodôntica (Dispositivo Médico) composta por 5 tiras de cera pré-cortadas sobre papel encerado em estojo plástico, disponível em 2 variedades: sem sabor (Ref. 723) e sabor menta (Ref. 724).

Porquê usar cera ortodôntica? Ao usar aparelhos de ortodontia pode ocorrer desconforto e irritações que resultam da fricção repetida dos aparelhos nos tecidos da mucosa oral. Os ortodontistas recomendam o uso de cera ortodôntica para formar uma barreira protetora sobre braquetes e fios para melhorar o nível de conforto durante o tratamento ortodôntico.

Indicações: GUM ORTHO Wax foi desenvolvido especificamente para proteger os tecidos da mucosa oral contra lesões e aliviar irritações causadas por aparelhos ortodônticos. Pode ser usado conforme necessário, tanto na prevenção quanto em aparelhos irritantes. O período de uso pode até estender-se por 30 dias consecutivos. Caso as lesões ou irritações persistam, consulte o seu ortodontista. GUM ORTHO Wax é para adultos e crianças com mais de 7 anos sob a supervisão de um adulto.

Contra-indicações: Não utilizar na presença de hipersensibilidade a algum dos ingredientes contidos no produto.

Ingredientes: GUM ORTHO Wax: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax. GUM ORTHO Wax Menta: Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Paraffin Liquid Wax, Aroma, Carvone, D-Limonene, Eugenol, Linalool.

Instruções de uso: Lave e seque as mãos. Seque a área de aplicação para uma melhor aderência. ① Quebre um pedaço de GUM ORTHO Wax, aqueça e modele entre os dedos. ② Aplique a cera para cobrir os fios e braquetes pressionando suavemente. Remova a cera antes de comer ou escovar os dentes. Insira um novo pedaço de cera após comer ou escovar. A cera pode ser mantida durante a noite. Depois de usar a cera, descarte-a no lixo doméstico.

Advertências e precauções: Manter fora do alcance das crianças. GUM ORTHO Wax destina-se apenas a uso oral. Não engula. Condições de armazenamento: +5°C a +40°C. Não use a cera após expirar o prazo de validade. Não use se a integridade da embalagem do dispositivo estiver danificada. Se notar algum incidente grave relacionado com a utilização do dispositivo, contacte o fabricante e a autoridade competente do seu país. GUM ORTHO Wax não foi testado em mulheres grávidas ou lactantes. Se estiver a tomar medicamentos ou us estiver grávida ou a amamentar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar GUM ORTHO Wax.

**Importador: Sunstar France S.A.S.,
105 rue Jules Guesde, FR-92300 Levallois-Perret**

Data da revisão: baseada no IFU de 2022-01-24



Fabricante:

Sunstar Europe S.A., Route de Pallatex 11, CH-1163 Etoy



Representante autorizado na Comunidade Europeia:

Sunstar France S.A.S., 105 rue Jules Guesde, FR-92300 Levallois-Perret

ORTHOWAXLE723PT CNP 6710004



Não utilize se a embalagem estiver danificada



Dispositivo médico



Limitação de temperatura



Número de catálogo
REF 723



Consulte as instruções de utilização



Data de validade



Número de lote